

CALEX[®] Cap



**Extraction
fécale**

Rapide

Facile

Stable


- Optimisation maximale du flux de travail
- Le standard pour une extraction fécale simple
- Stabilité à température ambiante

Les caractéristiques uniques du CALEX® Cap

Les tubes pré-remplis sont prêts à l'emploi pour une extraction en 3 étapes simples :

- 1** Plonger la tige dans l'échantillon de selles et couvrir complètement les stries avec la matrice.
- 2** Replacer la tige dans le tube, fermer fortement et homogénéiser l'extrait (vortex).
- 3** Pour les tests turbidimétriques uniquement : centrifuger le CALEX® Cap pendant 10 min.

L'extrait obtenu (1:500) est prêt à être utilisé pour les dosages turbidimétriques. Les valeurs obtenues avec le CALEX® Cap et la méthode manuelle par pesée sont fortement corrélées.

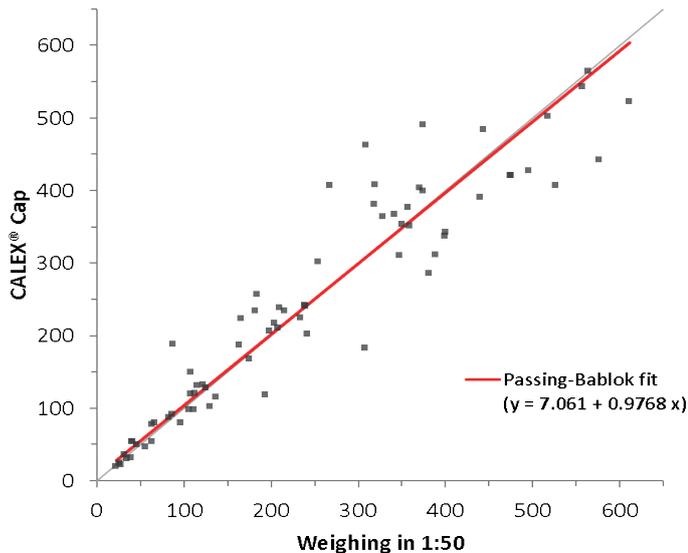

Comparaison du CALEX® Cap et de l'extraction manuelle. $r^2 = 0.9$

Côté pré-analytique
Automatisation totale du laboratoire et remplissage en douceur des racks avec le nouveau design de l'embout d'échantillonnage

Conçu pour des résultats quantitatifs

Côté analytique
L'ergonomie du bouchon facilite le dévissage automatisé ou manuel


- SIMPLICITE** Une ergonomie du bouchon permettant une utilisation simple et sûre du CALEX® Cap, réduisant significativement le temps de manipulation.
- AUTOMATISATION** Un design approprié aux systèmes d'Automatisation Totale du Laboratoire.
- STABILITE** Une validation étendue démontrant la stabilité des extraits à température ambiante pendant 7 jours. Le CALEX® Cap est conforme aux normes IATA 650 (UN3373) pour le transport aérien.
- EFFICACITE** Une dilution optimale de l'extrait à 1:500.



Du patient ...



...à la vitesse turbo...

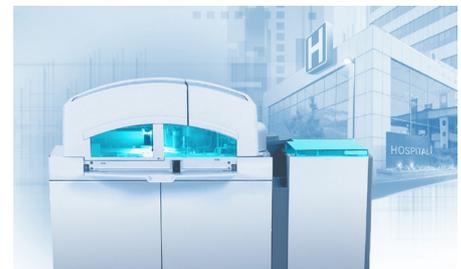

...jusqu'au laboratoire



BUHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BUHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14



Codes de commande :
B-CALEX-C50 50 unités
B-CALEX-C200 200 unités
B-CALEX-C500 500 unités

CE-marked products

CALEX® est une marque déposée par BUHLMANN dans de nombreux pays

Des éléments de CALEX® Cap sont protégés par brevet par : EP2833795(B1); US9752967(B2); AU2016203121(B2); CA2997598(C); JP6307132(B2); KR10-1875862(B1).