



BÜHLMANN GanglioCombi[®] *Light* ELISA

Σημασμένα με μίξη ενζύμων IgG/IgM, IgG και IgM

Ανίχνευση αντισωμάτων κατά του γαγλιοσιδίου
με ELISA
(GM1, GD1b, και GQ1b)

Για *In Vitro* Διαγνωστική Χρήση

EK-GCL-S

96 ΤΕΣΤ

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2026-05-04
Έκδοση A2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA είναι μια *in vitro* διαγνωστική δοκιμασία για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων IgG ή/και IgM έναντι επιλεγμένων νευρικών αντιγόνων/επιτόπων σε δείγματα ορού ασθενών με πιθανολογούμενες ή διαγνωσμένες αυτοάνοσες περιφερικές νευροπάθειες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διάγνωσης αυτοάνοσων περιφερικών νευροπαθειών σε συνδυασμό με άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα.

Για εργαστηριακή χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας. Δεν είναι αυτοματοποιημένο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα τρία σημασμένα ένζυμα, που περιέχονται στο κιτ, επιτρέπουν τρεις διαφορετικούς αλγόριθμους ελέγχου:

1. Η εξέταση με το μείγμα συζεύγματος IgG/IgM (εφεξής "μείγμα") επιτρέπει τον έλεγχο για την παρουσία αντινευρικών αντισωμάτων που υποδηλώνουν αυτοάνοση νευροπάθεια.
2. Η εξέταση με μεμονωμένα συζεύγματα IgG ή/και IgM επιτρέπει τον προσδιορισμό του ισότυπου των αντισωμάτων.
3. Για την εργαστηριακή επεξεργασία, ο αρχικός έλεγχος των δειγμάτων με χρήση του μείγματος (επιλογή 1) μπορεί να ακολουθηθεί από διαφοροποίηση των θετικών στο μείγμα δειγμάτων με χρήση μεμονωμένων συζευγμάτων IgG και IgM (επιλογή 2), εάν απαιτείται.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Το BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA επιτρέπει την επιλεκτική μέτρηση των αντισωμάτων γαγγλιοζιδίων στον ορό. Η πλάκα μικροπιλοδότησης είναι επικαλυμμένη με γαγγλιοσίδια: GM1, GD1b και GQ1b.

Οι οροί των ασθενών, οι μάρτυρες και ο βαθμονομητής προστίθενται στα βοθρία της πλάκας μικροπιλοδότησης. Μετά από 2 ώρες επώασης στους 2-8 °C και στάδια πλύσης, τα αντισώματα ανίχνευσης (anti-IgG/IgM, anti-IgG, anti-IgM) συζευγμένα με υπεροξειδάση χρένου (HRP) ανιχνεύουν το αντι-γαγγλιοσίδιο που συνδέεται με τα ακινητοποιημένα γαγγλιοσίδια στην πλάκα. Μετά από άλλες 2 ώρες επώασης και περαιτέρω βήματα πλύσης, προστίθεται το χρωμογόνο υπόστρωμα HRP, τετραμεθυλοβενζιδίνη (TMB) (σχηματισμός μπλε χρώματος) και ακολουθεί αντίδραση τερματισμού (αλλαγή σε κίτρινο χρώμα). Η απορρόφηση μετράται στα 450 nm. Η μετρούμενη απορρόφηση είναι ανάλογη του τίτλου των αντισωμάτων που υπάρχουν σε ένα δεδομένο δείγμα. Οι τίτλοι αντισωμάτων εκφράζονται ως % αναλογίες του βαθμονομητή και μπορούν να αντιστοιχιστούν σε κατηγορίες τίτλων (αρνητική, γκρίζα ζώνη, θετική).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αντιδραστήρια	Ποσότητα	Κωδικός	Ανασύσταση
Πλάκα μικροπιλοδότησης προεπικαλυμμένη με γαγγλιοσίδια	12 x 8 λωρίδες βοθρίων με πλαίσιο	B-GCL-MP	Έτοιμο για χρήση
Κάλυμμα πλάκας	3 τεμάχια		
Συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης (10x) με συντηρητικά	1 μπουκάλι x 100 mL	B-GCO-WB	Αραιώστε με 900 mL απιονισμένου νερού
Ρυθμιστικό διάλυμα επώασης με συντηρητικά	1 μπουκάλι x 100 mL	B-GCO-IB	Έτοιμο για χρήση
Βαθμονομητής λυοφιλοποιημένο με συντηρητικά	1 φιαλίδιο	B-GCO-CA	Προσθέστε 1,5 mL ρυθμιστικού διαλύματος επώασης
Μάρτυρας Αρνητικός, Χαμηλός και Μεσαίος¹ λυοφιλοποιημένο με συντηρητικά	3 φιαλίδια	B-GCO-CONSET	Προσθέστε 1,5 mL ρυθμιστικού διαλύματος επώασης
Σημασμένο μείγμα ενζύμων IgG/IgM αντίσωμα αντι-ανθρώπινου IgM και IgM συζευγμένα με HRP σε ρυθμιστικό πλέγμα με συντηρητικά	1 φιαλίδιο x 11 mL	B-GCO-ELGM	Έτοιμο για χρήση
Σημασμένο ένζυμο IgG αντίσωμα αντι-ανθρώπινου IgG συζευγμένο με HRP σε ρυθμιστικό πλέγμα με συντηρητικά	1 φιαλίδιο x 11 mL	B-GCO-ELG	Έτοιμο για χρήση
Σημασμένο ένζυμο IgM αντίσωμα αντι-ανθρώπινου IgM συζευγμένο με HRP σε ρυθμιστικό πλέγμα με συντηρητικά	1 φιαλίδιο x 11 mL	B-GCO-ELM	Έτοιμο για χρήση
Υπόστρωμα TMB TMB σε κιτρικό ρυθμιστικό	1 φιαλίδιο x 11 mL	B-TMB	Έτοιμο για χρήση
Ανασχετικό διάλυμα 0,25 M θειικό οξύ	1 φιαλίδιο x 11 mL	B-ST5	Έτοιμο για χρήση Διαβρωτικός παράγοντας

Πίνακας 1

¹Οι μάρτυρες περιέχουν συγκεκριμένα επίπεδα αντισωμάτων anti-GM1. Ανατρέξτε στο πρόσθετο φύλλο δεδομένων QC για την πραγματική μέση OD και την αναλογία %.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σφραγισμένα / κλειστά αντιδραστήρια	
Φυλάσσεται στους 2-8 °C. Μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια πέρα από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες.	
Ανοιγμένα / ανασυσταμένα αντιδραστήρια	
Μικρόπλακα	Επιστρέψτε τις αχρησιμοποίητες σειρές αμέσως στη θήκη από αλουμινόχαρτο που περιέχει τις συσκευασίες ξηραντικού και κλείστε ξανά κατά μήκος ολόκληρης της άκρης του φερμουάρ. Φυλάσσετε για έως και 6 μήνες στους 2-8 °C.
Αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης	Φυλάσσετε για έως και 6 μήνες στους 2-8 °C.
Ρυθμιστικό διάλυμα επώασης	
Σημασμένο ένζυμο	
Υπόστρωμα TMB	
Βαθμονομητές	
Μάρτυρες	
Ανασχετικό διάλυμα	Φυλάσσετε για έως και 6 μήνες στους 18-28 °C.

Πίνακας 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

- Πιπέτες ακριβείας με ρύγχη μιας χρήσης: Πιπέτες 10 µL, 20 µL, 100 µL και 1000 µL
- Σωληνάρια μιας χρήσης από πολυστυρένιο ή πολυπροπυλένιο για την παρασκευή αραιώσεων δειγμάτων
- 1000 mL κύλινδρος για την αραιώση του ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης
- Πλυστικό μικρόπλακας
- απορροφητικό χαρτί
- Αναδευτής μικρόπλακας
- Φωτόμετρο πλάκα μικροτιτλοδότησης για μέτρηση απορρόφησης στα 450 nm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Αυτή η δοκιμασία προορίζεται μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*.
- Ο βαθμονομητής και οι μάρτυρες αυτού του kit περιέχουν συστατικά ανθρώπινης προέλευσης. Παρόλο που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν αρνητικά για HBV, HCV και HIV1/2, τα αντιδραστήρια πρέπει να χειρίζονται σαν να είναι ικανά να μεταδώσουν λοιμώξεις και πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές (GLP) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες προφυλάξεις.
- Αυτό το kit περιέχει συστατικά ταξινομημένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008:
 - Το ανασχετικό διάλυμα περιέχει θειικό οξύ (συγκ. 2,5-5 %), επομένως τα αντιδραστήρια μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος (H315), σοβαρό ερεθισμό των ματιών (H319) και μπορεί να είναι διαβρωτικά για τα μέταλλα (H290).
 - Ο βαθμονομητής, οι μάρτυρες ελέγχου και τα σημασμένα ένζυμα περιέχουν υδροχλωρική 2-μεθυλ-

4-ισοθειαζολιν-3-όνη (συγκ. $\geq 0,0015$ %), επομένως τα αντιδραστήρια ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις (H317).

- Το ρυθμιστικό διάλυμα επώασης και το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης περιέχουν θειική γενταμικίνη, επομένως τα αντιδραστήρια ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική δερματική αντίδραση (H317).
- Αποφύγετε την επαφή των αντιδραστηρίων με το δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους. Εάν συμβεί επαφή, πλύνετε αμέσως με γενναιόδωρη ποσότητα νερού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ερεθισμός/εγκαύματα.
- Τα αντιδραστήρια και τα χημικά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανονισμούς για την ασφάλεια των βιολογικών κινδύνων.

Τεχνικές προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. Η απόδοση της δοκιμής θα επηρεαστεί αρνητικά, εάν τα αντιδραστήρια αραιωθούν, τροποποιηθούν ή φυλάσσονται λανθασμένα υπό συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία χρήσης.

Διαδικασία ELISA

Θερμοκρασία αντιδραστηρίων

- Προετοιμάστε τα αντιδραστήρια πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάλυσης. Βήματα 3-9: Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα βήματα 3-9 πρέπει να είναι κρύα (2-8 °C) και να διατηρούνται κρύα κατά τη μεταφορά με πιπέτα και το πλύσιμο. Σύσταση: Προετοιμάστε το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης την ημέρα πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης και βάλτε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα.
- Εκτελέστε όλα τα βήματα πλύσης με κρύο (2-8 °C) ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης.
- Ρυθμίστε το υπόστρωμα TMB και το ανασχετικό διάλυμα σε θερμοκρασία δωματίου (18-28 °C) στην αρχή της διαδικασίας ανάλυσης.

Βήματα πλύσης

- Τα βήματα πλύσης 3, 6 και 9 είναι κρίσιμα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής ή/και των δυναμικά μη δεσμευμένων αντισωμάτων στα βοθρία.
- Συνιστάται ανεπιφύλακτα ένα αυτοματοποιημένο πλυστικό που λειτουργεί σε "λειτουργία πλάκας", δηλαδή κάθε στάδιο της διαδικασίας (διανομή/αναρρόφηση) πραγματοποιείται σε όλες τις σειρές, διαδοχικά, πριν το όργανο συνεχίσει με τον επόμενο κύκλο πλύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βοθρία είναι εντελώς άδεια μετά τον τελευταίο κύκλο πλύσης.

Επώαση υποστρώματος

- Βήμα 11: Ανακινήστε τις πλάκα μικροτιτλοδότησης κατά την επώαση με υπόστρωμα. Ανάλογα με το μοντέλο του αναδευτήρα πλάκας προτείνουμε 400-600 rpm. Το διάλυμα πρέπει να κινείται στα βοθρία αλλά δεν πρέπει να χυθεί.

Εξαρτήματα κιτ

- Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικές παρτίδες αντιδραστηρίων.
- Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ αντιδραστηρίων, δειγμάτων ή μεταξύ βοθρίων.
- Οι πλάκες δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία απαιτεί < 0,1 mL αίματος ή < 50 µL ορού, αντίστοιχα.

Συλλέξτε αίμα σε απλούς σωλήνες φλεβοκέντησης χωρίς πρόσθετα και αποφύγετε την αιμόλυση. Εκτελέστε προετοιμασία ορού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μεταγγίστε τον ορό.

Τα δείγματα ορού μπορούν να αποθηκευτούν στους 2-8 °C για έως και οκτώ εβδομάδες, στους 28 °C για έως και μία εβδομάδα και στους ≤ -20 °C για έως και 25 μήνες. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αποψύχονται και να αναμιγνύονται επιμελώς με απαλό στροβιλισμό ή αναστροφή πριν από τη χρήση.

Συνιστούμε να προετοιμάζετε δείγματα ορού πριν από την κατάψυξη προκειμένου να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι κατάψυξης/απόψυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν δυο επιλογές:


- (1) Ανίχνευση μιγμάτων ισοτύπων (IgG και IgM): προσθήκη σημασμένης ενζυμικής μίξης στο βήμα 7
- (2) Ανίχνευση IgG ή IgM ισοτύπων: προσθήκη είτε σημασμένου IgG ενζύμου είτε σημασμένου IgM ενζύμου στο βήμα 7

Σημείωση: Φέρτε το διάλυμα υποστρώματος TMB σε θερμοκρασία δωματίου (18-28 °C).

1. Αραιώστε τα δείγματα 1:50 με ρυθμιστικό διάλυμα επώασης. Χρησιμοποιήστε π.χ. 10 µL ορού + 490 µL κρύου(!) (2-8 °C) ρυθμιστικό διάλυμα επώασης. Ανακατέψτε καλά με vortex και αφήστε τα αραιωμένα δείγματα καθώς και τον ανασυσταθέν βαθμονομητή και τους μάρτυρες σε θερμοκρασία 2-8 °C για 30 λεπτά πριν από τη προσθήκη (βλ. βήμα 4α και β).
2. Προετοιμάστε ένα πλαίσιο πλάκας με επαρκείς σειρές για να δοκιμάσετε τον απαιτούμενο αριθμό βαθμονομητών, μαρτύρων και δειγμάτων. Αφαιρέστε τις περισσές λωρίδες από το πλαίσιο και ξανασφραγίστε το στη θήκη από αλουμινοχαρτο μαζί με τις συσκευασίες ξηραντικού χωρίς καθυστέρηση. Αποθηκεύεται στο ψυγείο.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ψυχρά αντιδραστήρια στα βήματα 3 έως 9.

3. Πλύνετε τα βοθρία δύο φορές χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 300 µL κρύου(!) (2-8 °C) ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης ανά βοθρίο. Αδειάστε τα βοθρία και χτυπήστε την πλάκα σταθερά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε τελείως το υπόλοιπο υγρό.

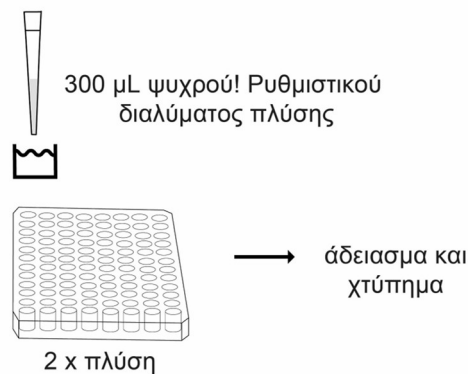

Σημείωση: Προχωρήστε αμέσως στα επόμενα βήματα.

4a. Προσθέστε 100 µL βαθμονομητή στο βοθρίο A1 (ανατρέξτε στην εικόνα 1A για την επιλογή 1 ή στην εικόνα 1B για την επιλογή 2).

4b. Προσθέστε 100 µL μεσαίου μάρτυρα στο βοθρίο B1, χαμηλού μάρτυρα στο βοθρίο A2 και αρνητικού μάρτυρα στο βοθρίο B2 (βλέπε σχήμα 1A ή 1B).

Σημείωση για την επιλογή 1: Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από τρεις λωρίδες ανά δοκιμή, ο βαθμονομητής και οι μάρτυρες μπορούν να δοκιμαστούν εις διπλούν (βλ. σχήμα 1A).

Σημείωση για την επιλογή 2: Ο βαθμονομητής και οι μάρτυρες πρέπει να εκτελούνται χωριστά για τους ισοτύπους IgG και IgM (βλέπε σχήμα 1B).

4c. Προσθέστε 100 µL αραιωμένου δείγματος 1 στα βοθρία C1-E1 (βλ. σχήμα 1A ή 1B).


4d. Προσθέστε 100 µL αραιωμένου δείγματος 2 στα βοθρία F1-H1 (βλ. σχήμα 1A ή 1B).

4e. Προσθέστε 100 µL των αραιωμένων δειγμάτων 3-24 (για την επιλογή 1) ή 3-12 (για την επιλογή 2) σε διαδοχικά βοθρία (βλέπε σχήμα 1A ή 1B).

Σημείωση για την επιλογή 2: επαναλάβετε την προσθήκη των δειγμάτων 1-12 με την ίδια σειρά στα εναπομείναντα βοθρία για έλεγχο με το δεύτερο ισότυπο.

5. Σφραγίστε την πλάκα με κάλυμμα και επώαστε για 2 ώρες (± 5 λεπτά) στους 2-8 °C (μην ανακινείτε την πλάκα).

6. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πλάκας. Αδειάστε τα βοθρία και πλύνετε τρεις φορές χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 300 µL κρύου(!) (2-8 °C) ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης ανά βοθρίο. Αδειάστε τα βοθρία και χτυπήστε την πλάκα σταθερά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε τελείως το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης.

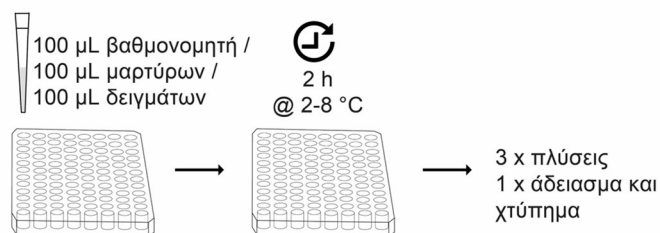

Για την επιλογή 1: Ανίχνευση μείγματος ισοτύπων


7. Προσθέστε 100 µL του μείγματος στα βοθρία.

Για την επιλογή 2: Ανίχνευση των IgG ή IgM ισοτύπων


7'. Προσθέστε 100 µL είτε του σημασμένου ενζύμου IgG ή IgM στα αντίστοιχα βοθρία (βλέπε σχήμα 1B).

- Σφραγίστε την πλάκα με κάλυμμα και επώαστε για 2 ώρες (± 5 λεπτά) στους 2-8 °C (μην ανακινείτε την πλάκα).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της πλάκας. Αδειάστε τα βοθρία και κάντε πλύσεις τρεις φορές χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 300 μ L κρύου(!) (2-8 °C) ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης ανά βοθρίο. Αδειάστε τα βοθρία και χτυπήστε την πλάκα σταθερά πάνω σε απορροφητικό χαρτί.


Για την επιλογή 1

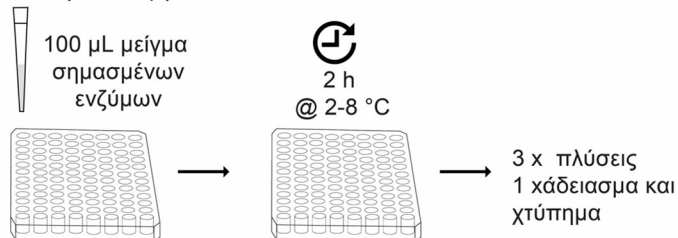


Για την επιλογή 2

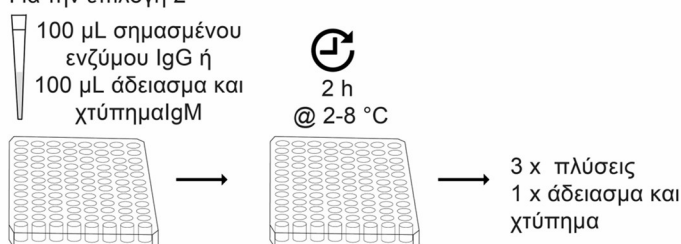

- Προσθέστε 100 μ L διαλύματος υποστρώματος TMB (εξισορροπημένο σε θερμοκρασία δωματίου) σε κάθε βοθρίο.
- Σφραγίστε την πλάκα με κάλυμμα προστατέψτε την πλάκα από το φως και επώαστε σε αναδευτήρα πλάκας που έχει ρυθμιστεί στις 400-600 rpm, στους 18-28 °C για 30 ± 2 λεπτά.

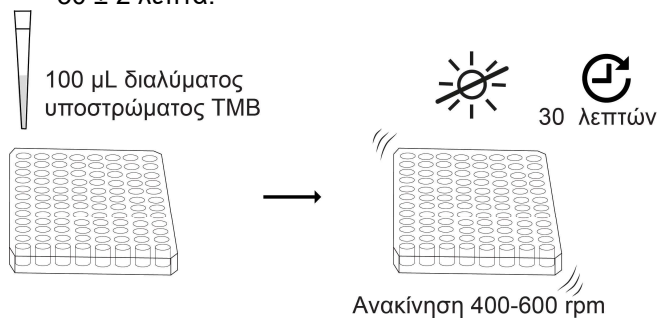

- Προσθέστε 100 μ L ανασχετικού διαλύματος σε όλα τα βοθρία. Αφαιρέστε τις φυσαλίδες αέρα με ένα ρύγχος πιπέτας. Προχωρήστε στο βήμα 13 μέσα σε 30 λεπτά.
- Διαβάστε την απορρόφηση στα 450 nm σε συσκευή ανάγνωσης πλακών.

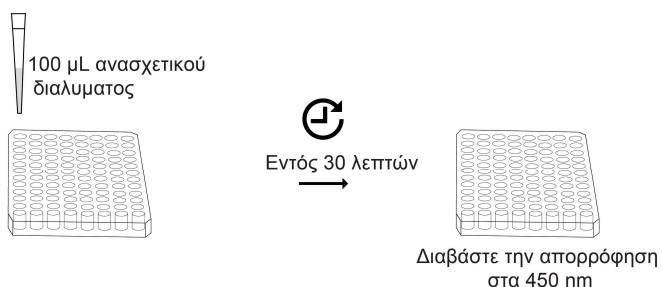

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πλήρης κατανόηση αυτών των οδηγιών χρήσης είναι απαραίτητη για την επιτυχή χρήση του προϊόντος. Αξιοπίστα αποτελέσματα θα ληφθούν μόνο με τη χρήση ακριβών εργαστηριακών τεχνικών και με ακρίβεια ακολουθώντας αυτήν την οδηγία χρήσης. Το kit BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA συνοδεύεται από τρεις μάρτυρες: αρνητικό, χαμηλό και μεσαίο μάρτυρα. Οι μάρτυρες έχουν εκχωρήσει εύρη τιμών (% Αναλογία) που υποδεικνύονται στο φύλλο δεδομένων QC που παρέχεται με κάθε kit. Οι μάρτυρες πρέπει να βρίσκονται εντός των ενδεικνυόμενων τιμών για να ληφθούν έγκυρα αποτελέσματα. Εκτός από τους μάρτυρες, συστήνουμε τη χρήση δεξαμενών ορού για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Μια ελάχιστη OD_{450nm} τιμή του 1,2 είναι προτεινόμενη για τον βαθμονομητή.

Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων πρέπει να είναι εντός των καθορισμένων ορίων. Εάν η απόδοση της ανάλυσης δεν πληροί τα καθορισμένα όρια και η επανάληψη έχει αποκλείσει σφάλματα στην τεχνική, ελέγξτε τα ακόλουθα ζητήματα: i) έλεγχος θερμοκρασίας (αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στο βήμα 3-9 διατηρούνται στους 2-8 °C); ii) ακρίβεια των θερμομέτρων, συσκευές πιπέτας και χρονισμού; iii) Ρυθμίσεις αναγνώση ELISA; iv) ημερομηνίες λήξης των αντιδραστηρίων; v) συνθήκες αποθήκευσης και επώασης; vi) το χρώμα του διαλύματος υποστρώματος TMB (θα πρέπει να είναι άχρωμο); vii) καθαρότητα νερού; viii) μέθοδοι αναρρόφησης και πλύσης.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν διεθνώς ή εθνικά αναγνωρισμένα υλικά αναφοράς ή διαδικασίες μέτρησης αναφοράς για το αντιγαγγλιοσίδιο σε δείγματα ορού. Το BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA είναι τυποποιημένο έναντι ενός εσωτερικά καθιερωμένου υλικού αναφοράς. Οι τιμές βαθμονομητή αποδίδονται σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο μεταφοράς τιμών (βλ. 1), ώστε να διασφαλίζεται η μετρολογική ιχνηλασιμότητα, και αναγράφονται σε αυθαίρετες μονάδες "%Αναλογία".

Το 95 % διάστημα εμπιστοσύνης της συνδυασμένης αβεβαιότητας των βαθμονομητών του προϊόντος προσδιορίστηκε σε 29,3 % για τα αντισώματα IgG και 37,6 % για τα αντισώματα IgM.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

- Καταγράψτε την απορρόφηση (OD) στα 450 nm για κάθε βοθρίο (βαθμονομητής, μάρτυρες και δείγματα).
- Εάν πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές μετρήσεις βαθμονομητή και μάρτυρα, υπολογίστε τον μέσο όρο των τιμών.

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως λόγος της απορρόφησης των δειγμάτων και της (μέσης) απορρόφησης του βαθμονομητή.

Μείγμα ισότυπων

$$\% \text{ Αναλογία} = \frac{\text{απορρόφηση δειγμάτων ή μαρτύρων}}{\text{απορρόφηση του βαθμονομητή}} \times 200$$

IgG και IgM ισότυποι

απορρόφηση δειγμάτων ή μαρτύρων

% Αναλογία: $\frac{\text{απορρόφηση δειγμάτων ή μαρτύρων}}{\text{απορρόφηση του βαθμονομητή}} \times 100$

Προγράμματα για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων ως ποσοστό % είναι διαθέσιμα στις περισσότερες συσκευές ανάγνωσης μικροπλακών.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους πίνακες 5 και 6 είναι παραδείγματα και παρέχονται μόνο για σκοπούς επίδειξης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Υψηλά αποτελέσματα % αναλογίας (> 100 %) για μεμονωμένα γαγγλιοσίδια μπορεί να οδηγήσουν σε διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με άλλα γαγγλιοσίδια στο ίδιο δείγμα. Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα θα παρουσιάζει συνήθως υψηλή διακύμανση μεταξύ των δοκιμών. Συνεπώς, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο από κοινού με έναν εμπειρογνώμονα/ειδικό.
- Λόγω της πολυαντιδραστικότητας των αυτοάνοσων αντισωμάτων και των διαφορών στη γεωγραφική επικράτηση, τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη της κλινικής ερμηνείας της νευροπάθειας από έναν ειδικό/εξειδικευμένο σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του ασθενούς (βλ. 2).
- Η δοκιμασία αυτή δεν έχει επικυρωθεί για την πλασμαφαίρεση.
- Οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες (IVIg) ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

Το διάστημα αναφοράς του BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA καθορίστηκε σύμφωνα με το CLSI C28-A3 με 120 δείγματα ορού από υγιή άτομα που δηλώθηκαν από τους ίδιους. Η συχνότητα κατανομής των αντισωμάτων αντιγαγγλιοσιδίων σε φυσιολογικούς αιμοδότες ταξινομήθηκε σε κατηγορίες τίτλων: αρνητική (< 30 % Αναλογία), γκρίζα ζώνη (30-50 % Αναλογία) και θετική (> 50 % Αναλογία). Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 7. Η τιμή αποκοπής για τη θετικότητα είναι 50 % της αναλογίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αντιγόνο	Μείγμα IgG/IgM		
	IgG IgM		
	Τιμές (αναλογία %)		
	< 30	30-50	> 50
GD1b	Αρνητικό	Επανελέγχος σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή	Θετικό
GQ1b			
GM1			

Πίνακας 3

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες πληροφορίες από την κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και άλλες διαγνωστικές διαδικασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ακρίβεια εντός του εργαστηρίου: 5,7 – 13,2 % CV

Η ενδοεργαστηριακή ακρίβεια καθορίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP05-A3 χρησιμοποιώντας τον τυποποιημένο σχεδιασμό μελέτης 20 ημέρες x 2 εκτελέσεις x 2 επαναλήψεις. Εξετάστηκαν τρία (3) συγκεντρωτικά δείγματα ορού ασθενών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 8.

Αναπαραγωγιμότητα: 7,7 – 19,1 % CV

Η αναπαραγωγιμότητα καθορίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP05-A3 χρησιμοποιώντας μελέτη με 3 όργανα/παρτίδα/χειριστή x 5 ημέρες x 5 επαναλήψεις. Εξετάστηκαν τρία (3) συγκεντρωτικά δείγματα ορού ασθενών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο Πίνακας 9.

Όριο τυφλού (LoB) ≤ Όριο ανίχνευσης (LoD): ≤ 30 % Αναλογία

Το LoB και το LoD καθορίστηκαν σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP17-A2 χρησιμοποιώντας τη μη παραμετρική ανάλυση. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 10.

Υψηλή δόση hook effect

Δεν παρατηρήθηκε περιορισμός λόγω υψηλής δόσης hook effect στο εύρος μέτρησης.

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα

Δεν παρατηρήθηκε συστηματική διασταυρούμενη αντιδραστικότητα για δείγματα από ασθενείς με διάφορες αυτοάνοσες νόσους (πίνακας 11) και από ασθενείς με άλλες νευρολογικές διαταραχές (πίνακας 12).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η κλινική απόδοση αξιολογήθηκε με περιγραφική ανάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας με αξιολόγηση από ομοτίμους. (5) μελέτες ασχολήθηκαν με την κλινική απόδοση του BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA στη διάγνωση αυτοάνοσων περιφερικών νευροπαθειών (παραπομπές 3-7). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι λεπτομέρειες των μελετών παρατίθενται στον πίνακα 4 και στον πίνακα 13, αντίστοιχα.

N περιφερική νευροπάθεια	160 (102 παιδιατρικό GBS, 14 CIDP, 44 GBS)
N μάρτυρες	375 (104 DC, 142 NC, 129 HC)
Ευαισθησία, μέσος όρος (95% CI)	57,0 % (38,6 – 75,4 %)
Ειδικότητα, μέσος όρος (95% CI)	79,8 % (66,8 – 93,2 %)

Πίνακας 4

GBS, σύνδρομο Guillain-Barré; DC, Έλεγχος μη νευρολογικής νόσου; NC, Νευρολογικός έλεγχος; HC, Υγιής έλεγχος; CIDP, Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια; CI, Διάστημα εμπιστοσύνης

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η ευαισθησία της ανάλυσης σε από του στόματος και ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και σε ενδογενείς ουσίες αξιολογήθηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή EP07-A3 της CLSI. Η μεροληψία στα αποτελέσματα $\geq \pm 20\%$ αναλογία θεωρήθηκε ως παρεμβολή.

Δεν ανιχνεύθηκε παρεμβολή με τις ακόλουθες ουσίες έως τις αναφερόμενες συγκεντρώσεις: ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (20 mg/mL), ριτουξιμάμπη (3 mg/mL), κλαδριβίνη (273 ng/mL), ιντερφερόνη άλφα-2α (49,5 ng/mL), γκαμπαπεντίνη (26,7 μg/mL), ιβουπροφαίνη (0,22 mg/mL), χλωραμβουκίλη (1,96 μg/mL), πρεδνιζόνη (99 ng/mL), πρεδνιζολόνη (1,2 μg/mL), ρευματοειδής παράγοντας (2340 IU/mL), αιμοσφαιρίνη (10 mg/mL), αιμολύτης (10 mg/mL), τριγλυκερίδια (15 mg/mL), συζευγμένη χολερυθρίνη (20 μg/mL), μη συζευγμένη χολερυθρίνη (150 μg/mL).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ρύθμιση πλάκας μικροτιτλοδότησης: Μείγμα σημασμένων IgG/IgM

		IgG/IgM Mix													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Calibrator & Controls	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	A
	Low	Low	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	B
GD1b															C
GQ1b	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	D		
GM1															E
GD1b															F
GQ1b	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	G		
GM1															H

24 sera IgG/ IgM Mix

Γράφημα 1A: ≤ 24 οροί / κιτ (1 MP / κιτ)

Ρύθμιση πλάκας μικροτιτλοδότησης: σημασμένα IgG & IgM

		IgG						IgM							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Calibrator & Controls	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	CAL	CTRL	A
	Low	Low	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	Med	Neg	B
GD1b															C
GQ1b	1	3	5	7	9	11	1	3	5	7	9	11	D		
GM1															E
GD1b															F
GQ1b	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	G		
GM1															H

12 sera IgG

12 sera IgM

Γράφημα 1B: 2 προφιλ / ορό, ≤ 12 οροί / κιτ (1 MP/κιτ)

Παράδειγμα αποτελεσμάτων

A Μείγμα σημασμένων IgG/IgM-Mix

B-GCO-ELGM	Απορρόφηση (OD450)	Αναλογία [%]
Βαθμονομητής	1,415	
	1,445	
Μέση τιμή Βαθμονομητή	1,430	200
Μεσαίος Μάρτυρας	0,498	69
	0,482	67
Μέση τιμή μεσαίου μάρτυρα	0,490	68
Χαμηλός Μάρτυρας	0,195	27
	0,191	26
Μέση τιμή χαμηλού μάρτυρα	0,193	27
Αρνητικός Μάρτυρας	0,090	12
	0,100	14
Μέση τιμή αρνητικού μάρτυρα	0,095	13
Δείγμα 1 GM1	0,544	76
Δείγμα 1 GD1b	0,745	104
Δείγμα 1 GQ1b	0,090	13

Πίνακας 5

B Σημασμένα IgG & IgM

Σημασμένα Ένζυμα	Απορρόφηση (OD450)		Αναλογία [%]	
	IgG	IgM	IgG	IgM
B-GCO-ELG/ B-GCO-ELM				
Βαθμονομητής	1,789	2,576		
	1,833	2,527		
Μέση τιμή Βαθμονομητή	1,836	2,551	100	100
Μεσαίος Μάρτυρας	1,267	1,743	69	68
	1,237	1,764	67	69
Μέση τιμή μεσαίου μάρτυρα	1,252	1,753	68	69
Χαμηλός Μάρτυρας	0,567	0,938	30	37
	0,584	0,942	32	37
Μέση τιμή χαμηλού μάρτυρα	0,571	0,940	31	37
Αρνητικός Μάρτυρας	0,061	0,098	3	4
	0,051	0,095	3	4
Μέση τιμή αρνητικού μάρτυρα	0,056	0,097	3	4
Δείγμα 1 GM1	0,171	3,814	9	150
Δείγμα 1 GD1b	1,021	0,354	56	14
Δείγμα 1 GQ1b	0,378	0,208	21	8

Πίνακας 6

Διάστημα αναφοράς

Αναλύτης	% φυσιολογικοί αιμοδοτές σε κατηγορίες			Όριο αναφοράς (90% CI)
	<30 % Αναλογία	30 - 50 % Αναλογία	> 50 % Αναλογία	
αντι-GM1 IgG	99,2	0,8	0,0	16 (13,0 – 29,8)
αντι-GM1 IgM	95,8	3,3	0,8	24 (14,3 – 40,3)
αντι-GM1 IgGM	95,0	4,2	0,8	34 (23,3 – 49,5)
αντι-GD1b IgG	97,5	1,7	0,8	21 (14,5 – 33,0)
αντι-GD1b IgM	99,2	0,0	0,8	15 (6,3 – 15,5) ^F 9 (6,4 – 54,7) ^M
αντι-GD1b IgGM	95,0	3,3	1,7	30 (22,3 – 71,6)
αντι-GQ1b IgG	97,5	2,5	0,0	24 (14,6 – 33,4)
αντι-GQ1b IgM	99,2	0,8	0,0	8 (6,2 – 17,8)
αντι-GQ1b IgGM	95,0	4,2	0,8	31 (23,1 – 46,7)

F Υποομάδα Γυναικών. M Υποομάδα Ανδρών

Πίνακας 7

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ακρίβεια εντός του εργαστηρίου

Περιγραφή δείγματος			Ακρίβεια εντός του εργαστηρίου			
Αναλύτης	Σηματοδότηση (Ισότυπος)	Προσδοκώμενη κατηγορία [%Αναλογία]	N	Μέσος όρος [%Αναλογία]	SD [%Αναλογία]	CV [%]
αντι-GM1 Ab	IgM	30-50	80	48	3,5	7,2
		> 50	80	91	6,2	6,8
	IgG	30-50	80	40	5,1	12,9
		> 50	80	106	13,1	12,4
αντι-GQ1b Ab	IgM	30-50	80	45	2,6	5,7
		> 50	80	85	6,7	7,8
	IgG	30-50	80	43	5,7	13,2
		> 50	80	80	6,9	8,6

Πίνακας 8

Εργαστηριακή ακρίβεια

Περιγραφή δείγματος			Αναπαραγωγικότητα			
Αναλύτης	Σηματοδότηση (Ισότυπος)	Προσδοκώμενη κατηγορία [%Αναλογία]	N	Μέσος όρος [%Αναλογία]	SD [%Αναλογία]	CV [%]
αντι-GM1 Ab	IgM	30-50	75	51	4,9	9,7
		> 50	75	94	7,2	7,7
	IgG	30-50	75	39	5,6	14,5
		> 50	75	106	17,1	16,1
αντι-GQ1b Ab	IgM	30-50	75	48	3,9	8,2
		> 50	75	92	9,9	10,7
	IgG	30-50	75	42	8,1	19,1
		> 50	75	78	12,0	15,4

Πίνακας 9

LoD και LoB

Αναλύτης	LoB [% Αναλογία]	LoD [% Αναλογία]
αντι-GM1 IgM Ab	5	21
αντι-GM1 IgG Ab	6	15
αντι-GQ1b IgM Ab	3	16
αντι-GQ1b IgG Ab	8	18

Πίνακας 10

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα

Εκχωρημένο αντίσωμα	Διάγνωση	#
Αντι-ουδετερόφιλο κυτταροπλασματικό αντίσωμα (ANCA)	Αγγειίτιδα	3
	Άλλα (δείγματα με θετική ένδειξη ANCA)	10
Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)	Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος	5
	Ρευματοειδής αρθρίτιδα	9
	σύνδρομο Sjogren	6
	Άλλα (δείγματα με θετική ένδειξη ANA)	3
Αντισώματα κατά της θυρεοσφαιρίνης (αντι-Tg)	Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα	5
Αντισώματα κατά της ριβονουκλεοπρωτεΐνης	Μικτή νόσο του συνδετικού ιστού	1
Αντι-GQ1b, αντι-GM1, αντι-GD1b	Αυτοάνοσες περιφερικές νευροπάθειες	1
Αντισώματα κατά των υποδοχέων ακετυλοχολίνης και κίνηση τυροσίνης ειδική για τους μύες	Βαρεία μυασθένεια	7

Πίνακας 11

Περιφερικές νευροπάθειες	#
Αλκοολικός	1
Διαβητικός	5
Περιφερική νευροπάθεια που μιμείται διαταραχές	#
Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS)	15
Σαρκοειδωση	4
Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (WM)	4
Νόσος Chagas	5

Πίνακας 12

Κλινική απόδοση

Μελέτη	Θετικοί μάρτυρες (περιπτώσεις)	Αρνητικοί μάρτυρες	Επίτοπος	Ευαισθησία	Ειδικότητα
Hashemilar et al., 2014	Παιδιατρικό ή GBS (n = 45)	DC (n = 35)	GM1	0,51	0,89
			GQ1b	0,56	0,74
Sharma et al., 2011	Παιδιατρικό ή GBS (n = 57)	NC (n = 42)	GM1	0,82	0,33
		DC (n = 35)			0,83
Khandelwal et al., 2006	GBS (n = 13)	HC (n = 19)	GM1	0,31	0,74
Uetz-von Allmen et al., 1998	GBS, CIDP (n = 19, 14)	NC (n = 100)	GM1	0,30	0,93
		HC (n = 110)			0,95
Spatola et al., 2016	GBS (MFS) (n = 12)	DC (n = 34)	GQ1b	0,92	0,97

Πίνακας 13

GBS, Σύνδρομο Guillain-Barré; DC, Έλεγχος μη νευρολογικής νόσου; NC, Νευρολογικός έλεγχος; HC, Υγιής έλεγχος; MFS, Σύνδρομο Miller Fisher; CIDP, Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια

ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Σημαντικό: Το βραχύ πρωτόκολλο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία χρήσης.

Πριν από την ημέρα της δοκιμής

Προετοιμασία ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης

Αραιώστε το συμπύκνωμα ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης σε αναλογία 1:10 με απιονισμένο νερό

↻ Σύσταση: ετοιμάστε το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης την ημέρα πριν από την εκτέλεση του προσδιορισμού και τοποθετήστε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

Ημέρα δοκιμής

Προετοιμασία Δειγμάτων/Οροί ελέγχου/Βαθμονομητών

Αραιώστε τα δείγματα ορού 1:50 με (κρύο!) ρυθμιστικό διάλυμα επώασης και αναμίξτε καλά με περιδίνηση

Προβείτε σε ανασύσταση των μαρτύρων και του βαθμονομητή προσθέτοντας 1,5 mL ρυθμιστικού διαλύματος επώασης

↻ αφήστε 30 λεπτά στους 2-8 °C

BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA

Προεπικαλυμμένη πλάκα μικροτιτλοδότησης

↻ πλύση 2x με $\geq 300 \mu\text{L}$ (κρύο!) ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης
100 μL βαθμονομητή, μάρτυρων ή δείγματα ορού (1:50)

↻↻ επώαση 2 ώρες ($\pm 5 \text{ min}$) στους 2-8 °C
πλύση 3x με $\geq 300 \mu\text{L}$ (κρύο!) ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης

προσθήκη 100 μL σημασμένου ένζυμου

↻↻ επώαση 2 ώρες ($\pm 5 \text{ min}$) στους 2-8 °C
πλύση 3x με $\geq 300 \mu\text{L}$ (κρύο!) ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης

προσθήκη 100 μL Υπόστρωμα TMB (θερμοκρασία δωματίου)!

↻ επώαση 30 λεπτά ($\pm 2 \text{ min}$) στους 18-28 °C σε αναδευτήρα πλάκας $\sim 400-600 \text{ rpm}$

προσθήκη 100 μL ανασχετικού διαλύματος (θερμοκρασία δωματίου)!

➡ Ανάγνωση της απορρόφησης στα 450 nm (εντός 30 λεπτών)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: 5 ΩΡΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Blirup-Jensen, S., Johnson, A. M. & Larsen, M. Protein standardization V: Value transfer. A practical protocol for the assignment of serum protein values from a Reference Material to a Target Material. *Clin. Chem. Lab. Med.* **46**, 1470–1479 (2008).
2. Bourque, P. R. et al. Autoimmune peripheral neuropathies. *Clinica Chimica Acta* **449**, 37–42 (2015).
3. Hashemilar, M. et al. Evaluating the status of antiganglioside antibodies in children with Guillain-Barré syndrome. *Neuroimmunomodulation* **21**, 64–68 (2013).
4. Sharma, M. B. et al. The presence of Mycoplasma pneumoniae infection and GM1 ganglioside antibodies in Guillain-Barré syndrome. *J. Infect. Dev. Ctries.* **5**, 459–464 (2011).
5. Uetz-von Allmen, E. et al. Antiganglioside GM1 antibodies and their complement activating capacity in central and peripheral nervous system disorders and in controls. *Eur. Neurol.* **39**, 103–110 (1998).
6. Spatola, M., Du Pasquier, R., Schluerp, M. & Regeniter, A. Serum and CSF GQ1b antibodies in isolated ophthalmologic syndromes. *Neurology* **86**, 1780–1784 (2016).
7. Khandelwal, D. et al. IgM anti-GM1 antibody titers in patients with monomelic amyotrophy. *Neurol. India* **54**, 399–401 (2006).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ημερομηνία	Εκδοχή	Αλλαγή
2026-05-04	A2	Ακρίβεια της Προβλεπόμενης χρήσης με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με την αυτοματοποίηση δοκιμασίας, τον πληθυσμό δοκιμασίας και τον προβλεπόμενο χρήστη. Αναθεώρηση των κεφαλαίων Γρήγορο πρωτόκολλο και Σύμβολα. Ενημέρωση των κεφαλαίων Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις (υποκεφάλαιο Προφυλάξεις ασφαλείας), Συλλογή και αποθήκευση δειγμάτων και Πίνακες και εικόνες. Ενημέρωση του συμβόλου eIFU στο εξώφυλλο (ισχύει μόνο για την αγγλική έκδοση του εγγράφου).

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Εάν έχει συμβεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτήν τη συσκευή, αναφέρετε χωρίς καθυστέρηση στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας.

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παρακαλούμε ενημερώστε τον διανομέα σας, εάν αυτό το προϊόν παραλήφθηκε κατεστραμμένο.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Η BÜHLMANN χρησιμοποιεί σύμβολα και σημεία που παρατίθενται και περιγράφονται στο ISO 15223-1.

Για τον ορισμό των συμβόλων δείτε το γλωσσάριο συμβόλων στη διεύθυνση: www.buhmannlabs.ch/support/downloads/
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και σημεία:

Σύμβολο	Εξήγηση
MP	Πλάκα μικροτιτλοδότησης
BUF WASH 10X	Συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης (10x)
BUF INC	Ρυθμιστικό διάλυμα επώασης
CAL	Βαθμονομητής
CONTROL -	Αρνητικός Μάρτυρας
CONTROL L	Χαμηλός Μάρτυρας
CONTROL M	Μεσαίος Μάρτυρας
EL IgG	Σημασμένο Ένζυμο IgG
EL IgM	Σημασμένο Ένζυμο IgM
EL MIX	Σημασμένο ένζυμικό μείγμα IgG/IgM
SUBS TMB	Υπόστρωμα TMB
SOLN STOP	Ανασχετικό διάλυμα

CE₀₁₂₃