

Quantum Blue® Adalimumab Medikamentenspiegel Schnelltest

ADM-Talspiegel
unverzöglich

- Führender quantitativer Schnelltest für das Adalimumab Monitoring
- Ergebnis nach 15 Minuten
- Messbereich von 1,3 bis 35 µg/mL Adalimumab im Serum
- Standardisierung gemäss WHO NIBSC 17/236
- Exzellente Übereinstimmung mit den Referenz-ELISAs
- CE validiert für Humira® und Biosimilars




Quantum Blue® Adalimumab Talspiegel Schnelltest

Merkmale:

- Führender quantitativer Schnelltest für Adalimumab
- Standardisiert und validiert gemäss erstem WHO Standard NIBSC 17/236¹
- Messbereich von 1,3 bis 35 µg/mL, erweiterbar bis 500 µg/mL
- Exzellente Übereinstimmung mit den Referenz-ELISAs
- Ideale Standardisierung und hohe analytische Performance ermöglichen die zuverlässige Messung des Adalimumab-Spiegels von 5-12 µg/mL²
- Validiert für Humira® und Hyrimoz®

Korrelation zum ELISA:

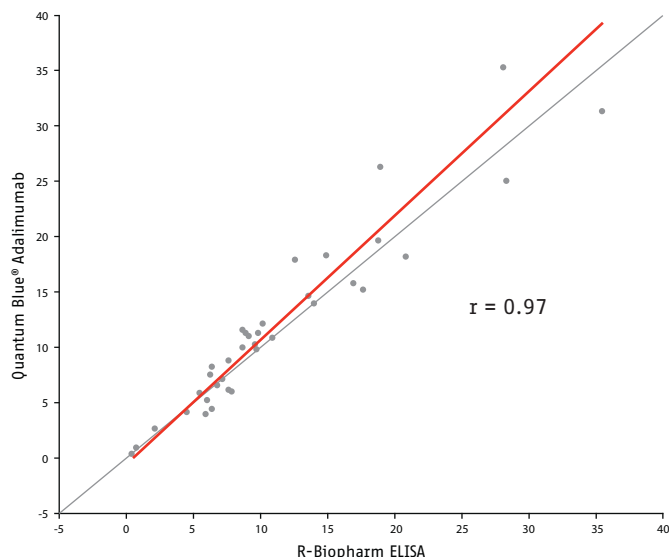

		RIDASCREEN ADM MONITORING (ELISA, µg/mL)		
		low	optimal	high
Quantum Blue® Adalimumab (µg/mL)	low	20.0%	5.0%	0.0%
	optimal	0.0%	27.5%	0.0%
	high	0.0%	12.5%	35.0%

— Passing-Bablok fit

Vollständige Übereinstimmung: 82.5%

Referenzen:

¹Afonso et al., 2021, Standardization of Quantum Blue® Rapid TDM Assays with WHO International Standards for Adalimumab and Infliximab

²Mitrev, N. et al., 2017, Review article: consensus statements on therapeutic drug monitoring of anti-tumour necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease, *Aliment Pharmacol Ther*



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhlmannlabs.at
www.buhlmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05

Quantum Blue® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.

Bestellcodes:

LF-TLAD10 10 Testkassetten
LF-TLAD25 25 Testkassetten

Weitere Produkte:

LF-ADIF10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-TLIF10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-ADAD10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-CALE25 25 Testkassetten
LF-CHR25 25 Testkassetten

CE-markierte Produkte