

NOVITÀ

Anticorpi Anti-IFX
risultato in
pochi minuti



Quantum Blue® Anti-Infliximab

Test Rapido per Anticorpi anti-Farmaco

- Test rapido su card per la determinazione degli anticorpi anti-infliximab
- Risultati in 15 minuti
- Eccellente specificità del 94,9% nella la ricerca di anticorpi anti-IFX
- Elevata concordanza con test di riferimento ELISA di terza parte



Caratteristiche principali


- Il test più rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-infliximab presente sul mercato
- Eccellente specificità e sensibilità nella determinazione degli anticorpi anti-IFX
- Combinazione dei livelli di farmaco e relativi anticorpi su Quantum Blue®, il sistema per test rapidi più conosciuto: La soluzione completa per TDM
- Test "Drug-sensitive" che riconosce gli anticorpi liberi
- Elevata concordanza (88%) con metodiche accreditate di parte terza

La comparazione di 238 pazienti con il test rapido Quantum Blue® Anti-Infliximab e un test ELISA di riferimento accreditato rivela un **eccellente accordo del 88%** (Fig. 1).

	RIDASCREEN Category 119 ng/mL			
	negative	positive	total	
Quantum Blue® Anti-Infliximab 1.3 µg _{eq} /mL	negative	112	23	135
	positive	6	97	103
	total	118	120	238

Fig.1

Concordanza = 88%

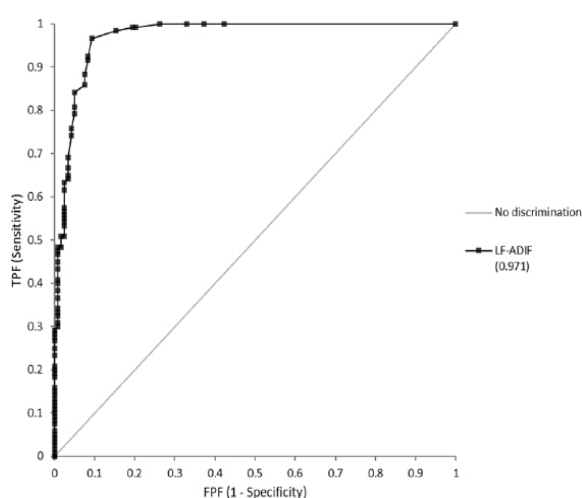

L'analisi della curva ROC mostra un' **eccellente specificità del 94,9%** e una **sensibilità dell'80,8%** al cut-off 1,3 µg_{eq}/mL con Area sottesa alla curva (AUC) = 0,971 (Fig.2).

Fig.2



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN Italia Srl
Italy
info@buhlmannlabs.it
www.buhlmannlabs.it
ordini: buhlmannitalia.ordini@legalmail.it

Quantum Blue® is a registered trademark of BÜHLMANN in many countries.

Codici ordini:
LF-ADIF10 10 card
LF-ADIF25 25 card

Prodotti correlati:
LF-TLIF10 10 card
LF-TLIF25 25 card
LF-TLAD10 10 card
LF-TLAD25 25 card
LF-CALE25 25 card
LF-CHR25 25 card
CE-marked products